



Pose du TRP

Objectif

Avant l'installation du TRP, certaines précautions doivent être prises pour assurer la stabilité et éviter la douleur ou les difficultés lors de la pose.

Matériel

Tournevis PSM Benefit® 33-18266 – Colle Nobil Grip (Nobil-Metal)


Moment de réalisation - fréquence

La pose du TRP est faite en visite 3 du traitement, le « jour 0 ».

Pose du TRP

Avant d'installer le TRP sur le patient, les étapes suivantes doivent être respectées :

Objets	Verification		
	Devant	Milieu	Derrière
1. Les TRP et modèles correspondent à la commande du client: nom du même patient sur le bon de commande et modèle en plâtre			
<u>Sur modèle en plâtre, sans l'arc du TRP</u>			
2. Le TRP est facilement placé et retiré de l'arcade dentaire supérieure du modèle en plâtre			
3. Le fil de jonction arrière ne frotte pas contre le côté distal des dernières dents			
4. Retournez le modèle face vers le bas et assurez-vous que la rétention de la bande de résine sur le modèle dentaire est correcte.			
5. La bande de résine n'empêche pas le serrage des dents lors du contact complet entre les modèles dentaires			
6. Le côté des parties linguales de la bande de résine doit épouser la forme de la partie inférieure du palais			
<u>Sur modèle en plâtre avec arc inséré, pour chaque arcade</u>			
7. L'insertion de arc dans la bande de résine permet toujours l'insertion et le placement corrects du TRP sur l'arcade dentaire supérieure			
8. Le TRP assemblé n'exerce pas de force transversale excessive sur les molaires avec chaque arc: il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la bande de résine transversalement pour l'insérer sur les molaires			
9. Chaque arc est à la bonne position: Devant = D5; Milieu = D7; Arrière = D8 + 5mm			
<i>Note: La position de l'arc tient compte de l'absence des dents (ex: si le patient a toute ses dents, l'arc avant se positionne en distal 5. S'il lui manque la 4, le TRP sera placé en distal 6.</i>			
10. L'arc avant. Niveau de-; l'arc milieu légèrement au-dessus du niveau d'occlusion prévu			
11. Les bords supérieurs des parties linguales de la bande de résine ne sont pas en contact avec la surface du palais, à la fois en position naturelle et lorsqu'une pression verticale est exercée sur l'arcade insérée.			
s			
13. Poussez sur l'arc avant avec le doigt et vérifiez que les extrémités avant de la résine du côté lingual ne se soulèvent pas et ne piquent pas la muqueuse palatine			
14. Les vis sont bien serrées sur l'arc Avant qui est bien fixé à la bande de résine			

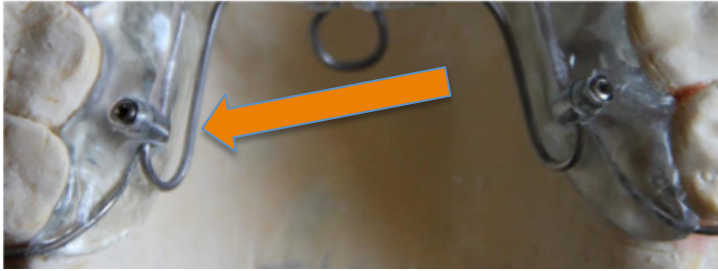

Pose

Lors de la pose du TRP, les étapes suivantes doivent être suivies (comme expliqué dans l'image ci-contre) :

1. Placer le TRP à l'avant (sur les incisives)
2. Relever progressivement le TRP à l'arrière jusqu'à ce qu'il soit adapté au maxillaire.



Rétention

Le TRP doit tenir sur les dents sans induire de forces sur celles-ci. Si le TRP exerce des pressions sur une dent, abraser légèrement le dispositif localement pour que le dispositif s'adapte parfaitement.

Causes potentielles de forces exercées :

- Défaut de fabrication : bandeau trop serré
- Arc trop large

Causes potentielles de faible rétention :

- Les branches des arcs ne sont pas parallèles aux fourreaux d'insertion