

## Procédures Tongue Lab

### Pose du dispositif TRP

Identification dentiste	_____		
Code du patient	_____	(cf. mode opératoire code patient)	
Age	_____	Sexe	<input type="checkbox"/> ♂ <input type="checkbox"/> ♀
Date	_____		

#### Prise de mesures pré-pose du TRP

1	Prise de PNIF <i>Mode opératoire disponible "mesure PNIF"</i>	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

#### Pose du TRP et exercices de rééducation/adaptation

2	Donner la notice d'utilisation au patient en même temps que le dispositif TRP. <i>Disponible: « notice patient TRP ».</i>	<input type="checkbox"/>
3	Réaliser les exercices de rééducation <b>sans TRP</b> <i>Mode opératoire disponible "exercices de rééducation et d'adaptation "</i>	<input type="checkbox"/>
4	Poser le TRP sur le patient <i>Mode opératoire disponible "Pose et réglage TRP"</i>	<input type="checkbox"/>
5	Réaliser les exercices d'adaptation au TRP. <i>Mode opératoire disponible "exercices de rééducation et d'adaptation "</i>	<input type="checkbox"/>

Le patient doit sortir du cabinet en ayant réussi à bien déglutir pendant au moins 3 minutes.

#### Prise de mesures post-pose du TRP

6	Prise de PNIF <i>Mode opératoire disponible "mesure PNIF"</i>	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------